

# ScanZon

## BV-L

- Anvendelse:** ScanZon BV-L flydende maskinopvaskemiddel uden klor anvendes, hvor arbejdsmiljøet kræver et lavalkalisk produkt. ScanZon BV-L er velegnet til al opvask i såvel blødt som hårdt vand af rustfrit stål, glas og porcelæn. Også velegnet til opvask af aluminium. ScanZon BV-L benyttes derfor med fordel til opvask af kirurgiske instrumenter og narkoseudstyr. ScanZon BV-L kan anvendes i alle typer opvaskemaskiner, tilsluttet op til max. 6 dH vand.
- Egenskaber:** ScanZon BV-L er særdeles velegnet til opvask af kirurgiske instrumenter og laboratorieudstyr.
- Dosering:** ScanZon BV-L er beregnet til dosering i automatisk doseringsudstyr. Doseringen indstilles af leverandøren. Dosering 1,5-3,0 g pr. 1 l vand, afhængig af opvaskens karakter.
- Indhold:** **Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:**  
5-15%: EDTA og salte heraf <5% nonionisk tensid, anionisk tensid, polycarboxylater.  
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.
- Vægtfylde:** Ca. 1,1 kg/l
- pH-værdi:** Koncentrat: Ca. 9,0  
0,2% brugsopløsning: Ca. 7,5
- Opbevaring:** Opbevares i tillukket originalemballage.  
Holdbarhed: 36 måneder.
- Emballage:** 11 kg plastdunk.  
Karton á 3x5,0 kg plastdunk.
- Sikkerhed:** Se vedlagte sikkerhedsdatablad af 18.06.2015

**Scan-Clean**  
ApS

Frederikshøjvej 78 · 7100 Vejle  
Tel. 75 83 83 99 · Fax 75 83 10 15  
post@scan-clean.dk · www.scan-clean.dk  
ISO 14001 Miljøcertificeret